

Bepanthen® Eye acu pilieni **Nātrija hialuronāts 0.15%, dekspantenols 2%**

APRAKSTS

Bepanthen® Eye acu pilieni veido sterilu, konservantus nesaturošu, viskoelastīgu, caurspīdīgu aizsargslānīti uz radzenes. **Bepanthen®** Eye acu pilieni satur nātrija hialuronātu - hialuronskābes nātrija sāli, kas savu īpašību dēļ uz acs radzenes veido vienotu, noturīgu un īpaši ilgas iedarbības aizsargslāni, kas neietekmē redzi. Papildus tam **Bepanthen®** Eye acu pilieni satur provitamīnu B5 (dekspantenolu), kuram piemīt spēja izteikti piesaistīt ūdeni; tas gan mitrina un pasargā acis, gan pastiprina nātrija hialuronāta mitrumu saglabājošās īpašības.

Nātrija hialuronāta (stabilizē asaru plēvīti) un dekspantenola (mitrina, nomierina) kombinēšana nodrošina acs virsmas aizsardzību un mitrināšanu.

Tā rezultātā Bepanthen® Eye nodrošina ilgstošu nomierinošu iedarbību sekojošos gadījumos:

- mehānisks stress, piemēram, cieto vai mīksto kontaktlēcu lietošanas laikā vai diagnostiskas acu pārbaudes laikā;
- kaitīga vides iedarbība, piemēram, gaisa kondicionēšana, vējš, aukstums, sauss gaiss vai gaisa piesārņojums, piemēram, ar cigarešu dūmiem;
- acu kairinājums no intensīvas redzes noslodzes, piemēram, strādājot pie datora, mikroskopa vai ilgstoši vadot transportlīdzekli.

Konservantus nesaturošajiem **Bepanthen®** Eye acu pilieniem ir laba panesība arī lietojot tos ilgstoši. **Bepanthen®** Eye acu pilieni piemēroti arī cilvēkiem, kas lieto kontaktlēcas.

LIETOŠANA

Noplēsiet vienu vienas devas flakonu. Pārlicinieties, ka flakons nav bojāts. Lai atvērtu vienas devas flakonu, pagrieziet plakano vāciņu (neraujiet). Nedaudz atlieciet galvu uz aizmuguri, skatieties uz augšu un viegli atvelciet apakšējo plakstiņu prom no acs, iepilniet vienu pilienu katrā acī aiz apakšējā plakstiņa 3-5 reizes dienā. Lēni aizveriet acis, lai šķidrums vienmērīgi pārklātu pa acs virsmu. Ja diskomforts palielinās vai stāvoklis neuzlabojas, konsultējieties ar acu ārstu!



SATURS

Nātrija hialuronāts 0,15%, dekspantenols 2%, nātrija hlorīds, nātrija monohidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāts, ūdens injekcijām.

IEPAKOJUMA LIELUMS

Tirdzniecības vienība: vienas devas flakons, 10 x 0,5 ml / 20 x 0,5 ml / 40 x 0,5 ml / 60 x 0,5 ml.

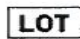

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI UN BRĪDINĀJUMI


- Nelietojiet zāles, ja vienas devas flakons vai maisījums ir bojāts.
- Nepieskarieties acij ar vienas devas flakonu.

- Nelietojiet, ja Jums ir alerģija pret kādu no sastāvdaļām.
- Ļoti retos gadījumos pilienu lietošana var izraisīt kairinājumu ļoti jutīgās acīs.
- Tikai vienreizējai lietošanai. Tā kā **Bepanthen**[®] Eye acu pilieni nesatur konservantus, šķīdums, kas netiek izlietots uzreiz pēc atvēršanas, jāiznīcina.
- Ja Jūs vienlaicīgi lietojat citus acu pilienus/acu ziedī, uzgaidiet apmēram 15 minūtes. **Bepanthen**[®] Eye acu pilieni vienmēr jālieto kā pēdējie.
- Nelietojiet, ja acs ir inficēta vai traumēta.
- Pēc lietošanas iespējama īslaicīga redzes miglošanās; nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpoiet mehānismus līdz redzes asums normalizējas.
- Nelietojiet acu pilienus pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz katra vienas devas flakona, maisiņa un uz kartona kārbīņas.
- **Bepanthen**[®] Eye acu pilieni satur fosfāta buferi. **Bepanthen**[®] Eye acu pilienu ilgstošas lietošanas rezultātā un funkcionālu radzenes slimību gadījumā var rasties kalcija sāļu precipitācija radzenē.


UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 2–25 °C temperatūrā. Nesasaldēt. Maisiņus uzglabāt kartona kārbīnā.

 Sērijas numurs un  “derīgs līdz” ir norādīts uz katra vienas devas flakona.

 Ražots aseptiskos apstākļos

 Tikai vienreizējai lietošanai

 Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

 Uzglabāšanas temperatūra

 **Ražotājs**


Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3
D-92551 Stulln
Vācija

Izplatītājs

UAB „Bayer“
Žirmūnu 68A
LT-09124 Vilnius
Lietuva

Pārstāvis Latvijā

SIA Bayer
Skanstes iela 50
Rīga, LV-1013, Latvija
Tālrunis 67845563

 0483

Informācija pārskatīta 01/2014